

Huuhteludesinfektiolaitteen tarkistuslista

kuukausi _____ vuosi _____

Päivittäistarkistukset	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Viemäriin tarkistus																															
Pesurien ja suuttimien tarkistus																															
Pesuaineen tarkistus																															
Laitteen tuoksun tarkistus																															

Viikkotarkistukset	viikko 1	viikko 2	viikko 3	viikko 4	viikko 5		Päivittäistarkistuksen tarkemmat ohjeet:
Laita pesuaineen kulutuksen seurantaviiva pesuainekannan kylkeen							Viemäriin tarkistus: - kaada ämpärillinen vettä koneen kammioon ja tarkista, että vesi laskee viemäriin
Pyyhi suuttimet yleispuhdistusaineella kostutetulla mikroklouduilla. Harjaa laitteen viemäri ja käytä kone tyhjäksi. <i>Huomioi, että Steelcon-laitteiden viemäriä ei saa harjata, pese kone tyhjäksi ohjelmalla P3.</i>							Pesurien ja suuttimien tarkistus: - tarkista, että pesurit pyörivät vapaasti - tarkista, että suuttimien vesireitit ovat avonaisia
Tarkista, että ohjelmapaneeli on ehjä.							Pesuaineen tarkistus: - tarkista merkinnät ja pesuaineen kulutus
Tarkista, että laitteen yleisilme ulkoa on siisti.							Laitteen tuoksun tarkistus: - tarkista, että huuhteludesinfektiolaitteessa on puhdas tuoksu pesuohjelman jälkeen

- Jos laitetta ei ole käytetty yli vuorokauteen, käytä kone tyhjäksi ennen välineiden pesua.
- Vikatilanteessa tee korjauspyyntö laitteen tunnusnumerolla Paketin kautta.

